



Test Celiachia

I sintomi, spesso molto generici, della celiachia la rendono una malattia piuttosto difficile da diagnosticare. Con MyCare, in 10 minuti, si può compiere il primo passo per una corretta e tempestiva diagnosi.

Cos'è

La celiachia è una malattia autoimmune dell'intestino tenue causata da una intolleranza al Glutine contenuto nelle farine di grano, orzo, segale ed altri cereali. I sintomi possono essere: diarrea, perdita di peso, dolori e crampi addominali, astenia, ecc. L'assunzione di glutine da parte di soggetti sensibili, causa una reazione infiammatoria con la produzione di anticorpi da parte del nostro sistema immunitario. I metodi sierologici quali la ricerca di Anticorpi Antigliadina, Anti Transglutaminasi tissutale umana e Antiendomiso, rappresentano un metodo pratico affidabile e non invasivo per rilevare la presenza della malattia.

I nostro test

Il kit MyCare Test Celiachia rileva la presenza, da una sola goccia di sangue, di Anticorpii Anti Gliadina e Anti Transglutaminasi tissutale umana. E' un test di screening affidabile che ti consentirà, consultando il tuo medico, di adottare immediatamente le misure più efficaci per risolvere i tuoi problemi.

Procedura

1. Preparare la lancetta rimuovendone la protezione.
2. Disinfettare il polpastrello.
3. Posizionare la lancetta sul dito e premere il pulsante di attivazione.
4. Con l'apposita pipetta, prelevare la goccia di sangue.
5. Depositare la goccia di sangue nella card.
6. Dopo 30 Sec. depositare 3 gocce di diluente nella card.
7. Attendere 10 minuti prima di leggere il risultato